

بخش وسایل کمک توانبخشی مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج) در راستای گسترش خدمات توانبخشی و تعامل بهینه مددجو، درمان و خانواده و احساس نیاز در این زمینه برای اولین بار اقدام به طراحی، تولید و ساخت وسایل کمک توانبخشی نموده است تا بتواند گام موثری در جهت تسکین آلام ناشی از مشکلات توانخواهان بردارد. این وسایل با کیفیتی مناسب و هزینه ای نازل برای افزایش نقش مشارکتی خانواده و کمک به روند درمان ارائه می گردند. یکی از وسایل مورد نیاز جهت این کودکان کرنرسیت (wooden Corner chair) می باشد.

این وسیله بصورت اختصاصی برای کودکانی ساخته شده است که نمی توانند وضعیت های ضد جاذبه مانند بالا نگه داشتن سر و یا وضعیت نشستن را اتخاذ کنند و توانائی انجام فعالیت ها در خط وسط را نداشته و قادر به انجام فعالیت های حرکتی ظریف نیستند.

این وسیله بر مبنای جثه و فیزیک بدنی توانخواهان از هفت ماهگی تا ده سالگی با نظر مستقیم کارشناسان مؤسسه برای ایشان تجویز می شود.



نحوه استفاده از این وسیله:

طراحی این وسیله به گونه ای است که دارای سه ضلع، یک کفی (نشیمنگاه) و پدهای اطراف سر می باشد. که ضلع وسطی این وسیله جهت جلوگیری از انحراف به سمت جلو و عقب کودک در نظر گرفته شده است و دارای یک پشتی متحرک و قابل تنظیم است که می توان کودک را در آن به حالت ایستاده نگه داشت. همچنین دو ضلع کناری این وسیله قابل تنظیم است و متناسب با جثه کودک می توان آن را تغییر داد این اضلاع به گونه ای در نظر گرفته شده اند که آزادی عمل کودک را به طرفین آسان می سازند و از انحراف جانبی کودک جلوگیری می نمایند. برای جلوگیری از آسیب به کودک، قسمت هائی که مستقیماً با بدن کودک ارتباط دارند با فوم پوشیده شده اند. برای ثابت کردن بدن کودک در این وسیله از استرپ استفاده گردیده است همچنین دارای یک جا دستی است که براحتی می توانید آن را در محیط داخل و خارج خانه جابجا کنید

کاربردها:

- کودکان فلج مغزی که دارای تون عضلانی پائین هستند.
- کودکانی که از حد سن تقویمی نشستن خود عقب ترند و قادر به نگه داشتن سر و گردن و تنه خود نیستند.
- کودکانی که ضعف یا شلی عضلات تنه دارند.
- کودکانی که ضعف در عضلات تعادلی تنه دارند.
- آموزش طریقه صحیح نشستن به کودک و جلوگیری از بدشکلی ثانویه

فواید استفاده از این وسیله

- از خم شدن کتف و شانه به سمت جلو جلوگیری می کند و باعث افزایش استفاده از حرکات دست می گردد.
- کودک برای یادگیری نیازمند یک نشستن خوب می باشد که بتواند بخوبی محیط پیرامون خود را ببیند و به کنکاش آن بپردازد.
- این وسیله ابزار خوبی برای آموزش، گفتاردرمانی و تغذیه کودک می باشد.
- به عملکرد سیستم گردش خون، تنفس، و کلیه های کودک کمک می نماید.
- مانع از وارد شدن صدمات جسمی به والدین کودک می شود که مجبورند انرژی زیادی را صرف نشستن کودک کنند.
- روابط اجتماعی کودک را بهبود می بخشد و کودک می تواند براحتی در مهمانیها و جشنها در آن نشسته و با سایرین ارتباط برقرار کند.
- باعث ثبات سر، تنه و لگن بصورت قائم و در خط وسط می گردد و انجام بازی و تماشای برنامه های تلویزیون براحتی برای کودک میسر می گردد.
- می توان در ساعاتی از روز کودک را در حالت ایستاده قرار داد که به ثبات مفاصل کمری، لگن، زانو و مچ پا و تقویت عضلات آنها کمک می کند.

احتیاطات:

- از شستشوی مستقیم کرنرسیت با آب و مواد شوینده پرهیز نمائید و در صورت نیاز از پارچه نمناک استفاده کنید.



مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج)

کرنرسیت (wooden corner chair)

وسيله ای برای بهتر نشستن

کودک دلبنده شما



تلفن: ۳-۲-۸۸۷۷۳۱۰

نمبر: ۶-۸۸۷۷۳۱۰

<http://www.vrf.ir>

info@vrf.

• مرکز جامع توانبخشی فروغ عصر

شیراز- خیابان قصردهشت- روبروی دانشکده
دندانپزشکی- پلاک ۲۲۴
تلفن: ۹-۶۲۹۰۰۹۸-۰۷۱۱-۶۲۹۹۹۷۹-۰۷۱۱

• مرکز جامع توانبخشی نگار عصر

کاشان- خیابان شهید بهشتی- بن بست آزادی بیست و پنج
تلفن: ۴۴۶۵۵۱۱-۰۳۶۱-۰۳۶۱

• مرکز جامع توانبخشی نگین عصر

مشهد: چهارراه خیام - بلوار سجاد- روبروی خیابان
میلاذ- پلاک ۷۰
تلفن: ۵۱۱-۷۶۱۴۵۰۸-۰۵۱۱-۷۶۸۶۵۳۱-۰۵۱۱

۲. از قرار دادن آن در مجاورت آتش و یا مواد قابل اشتعال
خودداری نمائید.

۳. فوم قسمت نشیمن گاهی را می توان بصورت دو طرفه
استفاده کرد.

۴. در صورت نیاز به راهنمایی جهت استفاده بهینه از
کرنرسیت با آدرس ذیل تماس حاصل نمائید.

آدرس دفتر مرکزی:

تهران: چهارراه جهان کودک- بزرگراه حقانی- بعد از

دیدار جنوبی - پلاک ۲۷

تلفن: ۸۸۶۶۵۶۲۵

• مرکز جامع توانبخشی امیدعصر

تهران: چهارراه جهان کودک- بزرگراه حقانی- نبش
دیدار جنوبی- پلاک ۲۱

تلفن: ۸۸۸۸۲۵۶۰-۸۸۸۸۰۸۰۱-۸۸۸۸۰۸۰۱-۸۸۸۸۲۵۶۰

• مرکز جامع توانبخشی نویدعصر

تهران: خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه مولوی- نبش
کوچه عرفانیان- پلاک ۴۳۴

تلفن: ۵-۵۵۳۶۳۹۰۲-۵۵۳۸۲۷۴۲-۵۵۳۸۲۷۴۲

